

## BIPAP A40 (Philips Respironics)



Capteur de SpO<sub>2</sub> (optionnel)



Humidificateur



Carte SD

Batterie amovible avec autonomie de ± 5 h (optionnel)



- Modes ventilatoires : **CPAP, S, ST, T, PC, AVAPS-AE**  
**(poids minimal 10 Kg pour la détection du débit inspiratoire)**
- En mode CPAP: mettre toujours le trigger en **Autotrack Sensitive**
- Possibilité d'ajouter un volume courant (VT) minimal : **AVAPS**  
**Attention : VT minimal 200 mL**
- **Attention : PAS de batterie interne** ; possibilité d'ajout d'une batterie amovible et batterie externe
- Ajout d'O<sub>2</sub> en plaçant un raccord sur le circuit patient
- **Attention : alarmes validées pour un poids > 10Kg**

### Pour allumer et éteindre l'appareil :


Pour allumer l'appareil : appuyer sur



Pour arrêter l'appareil : appuyer sur et confirmer la mise hors tension avec le bouton droit.

### Principe de navigation

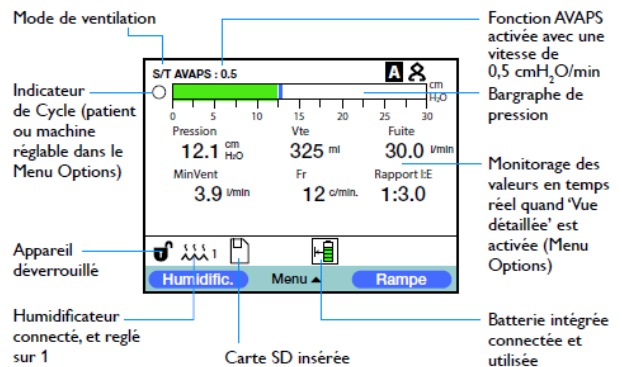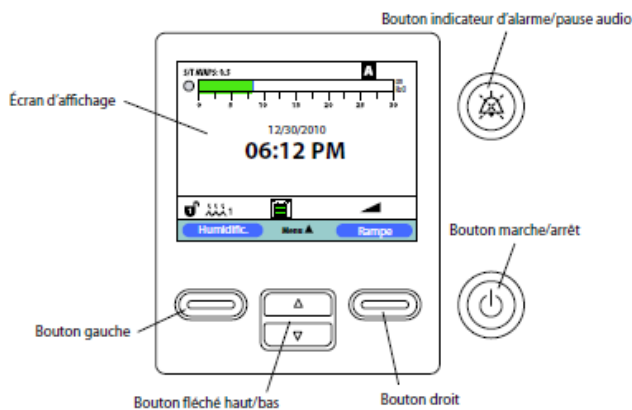


## Mise en route/Arrêt de la ventilation :

- Démarrez la ventilation en sélectionnant le bouton droit (**Traitement**)  
*Attention, le délai de démarrage est de  $\pm 10$  secs*
- Pour arrêter la ventilation, appuyer sur la touche  et confirmer l'arrêt de la ventilation ou la mise hors tension de l'appareil: choisir « **veille** » ou « **mettre hors tension** » avec les flèches, puis confirmer avec **OK**

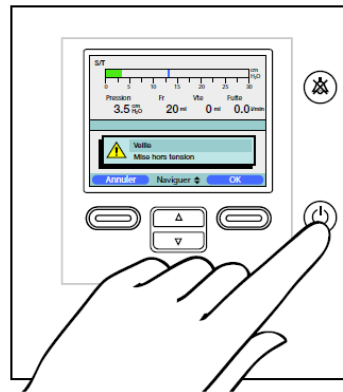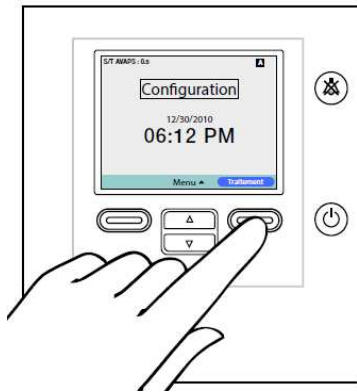


## Accès au « mode clinique » (déverrouillage/verrouillage)

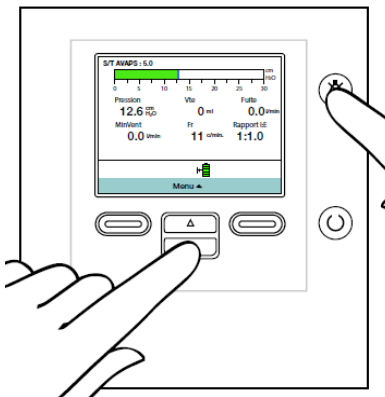

Appuyer **simultanément** sur le bouton alarme et la flèche du bas jusqu'au double bip sonore.

Attention : l'appareil doit être allumé pour pouvoir être déverrouillé.

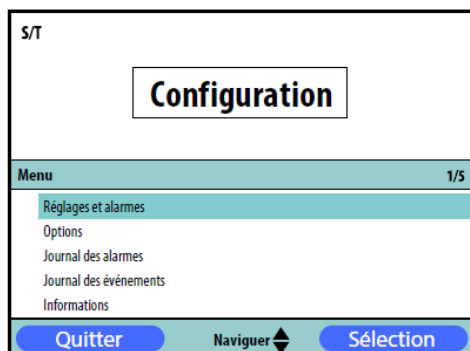

Pour naviguer entre les différentes options ou valeurs, utiliser les boutons HAUT/BAS.

Pour valider une option ou quitter l'écran, utiliser les boutons GAUCHE/DROITE.

**ATTENTION** : penser à toujours vider l'humidificateur avant de transporter le ventilateur.