

## AirSense 10 & Lumis 100/150 (ResMed)



MACHINES	MODES VENTILATOIRES
AirSense 10	CPAP / Auto-CPAP ➤ Smart Start à désactiver
Lumis 100	CPAP / S / ST / T / PAC
Lumis 150	CPAP / S / ST / T / IVAPS / PAC

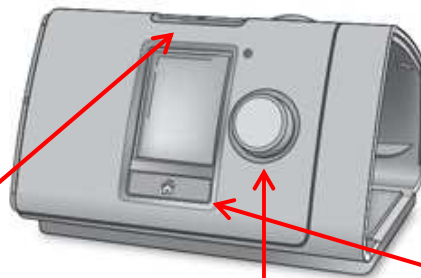
**Poids minimal 30 Kg pour la détection du débit inspiratoire**




**Attention :** pas de batterie interne, pas d'alarmes (alarme fuites seulement).

**penser à toujours vider l'humidificateur avant de transporter le ventilateur.**

**Pour allumer (et éteindre) l'appareil :** brancher (débrancher) la prise secteur.

**Mise en route/Arrêt de la ventilation :**



		
Appuyez sur la touche pour démarrer/arrêter la ventilation (confirmer l'arrêt de la ventilation si option sélectionnée)*	Tournez la molette pour naviguer dans le menu et appuyez dessus pour sélectionner une option. Tournez la molette pour ajuster une option sélectionnée et appuyez dessus pour enregistrer votre changement.	Appuyez sur la touche pour retourner à l'écran d'accueil

\*Maintenir appuyé pendant 3 sec pour mettre la machine en veille ; appuyer brièvement pour quitter le mode veille.

**Pour déverrouiller (accéder au menu clinique)**

- Appuyer simultanément sur la molette  et la touche écran d'accueil 

**Pour verrouiller**

- Sélectionner « QUITTER M. CLINIQUE ».