


# Stellar 150 (ResMed)

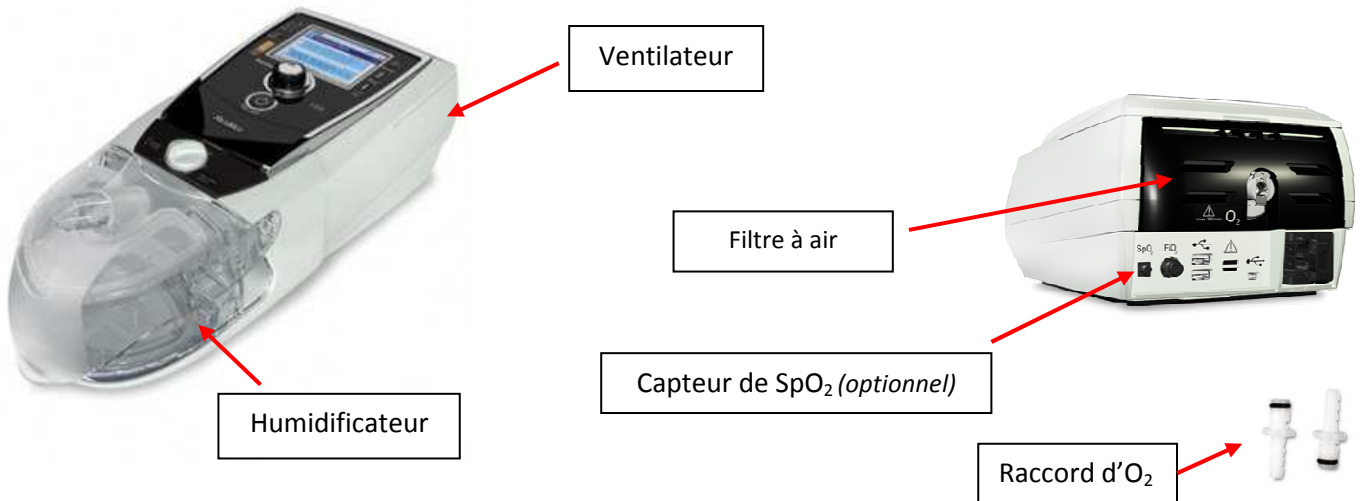

- Modes ventilatoires : **CPAP, S, ST, T, iVAPS, PAC**  
**(poids minimal 13Kg pour la détection du débit inspiratoire)**
- Volume courant (VT) minimal **130 mL**
- Batterie interne : autonomie entre 2 et 4 heures
- Pour rajouter de l'O<sub>2</sub> : brancher l'O<sub>2</sub> mural sur le connecteur d'O<sub>2</sub> à l'arrière du ventilateur
- **Attention : alarmes validées pour un poids > 13Kg**

**Pour allumer et éteindre l'appareil : bouton à l'arrière du ventilateur**



**Mise en route/Arrêt de la ventilation :**

Pour démarrer la ventilation : appuyer sur



Pour arrêter la ventilation : appuyer sur



et confirmer par « OUI » en appuyant sur



**Principe de navigation**



Accès au menu clinique : **Monitoring**  **Réglages**  et **Information** 



**Bouton de réglage :** - Tournez le bouton pour faire défiler les options et modifier les réglages  
- Appuyez sur le bouton pour ouvrir un menu et confirmer une sélection

Pour éteindre l'alarme :





## Accès au « mode clinique » (déverrouillage/verrouillage)

Maintenir appuyées les touches et pendant au moins 3 sec et spécifier le temps « d'accès clinique » souhaité (5 min, 120 min ou infini).



| MENU CLINIQUE | MONITORAGE  | REGLAGES   | INFO  |
|---------------|---|--|---|
|               | Traitement (écran d'accueil)<br>Monitoring<br>Pression/Débit (courbes)<br>Ventil minute/Fréquence respi (courbes)<br>Fuite (courbes)<br>Volume courant (courbes)<br>Synchronisation<br>Oxygénémie (courbes) | Réglages cliniques<br>Réglages d'alarme<br>Options (Smart Start, Rampe, ...) | Journal événements<br>Fuite (tendances)<br>Ventilation minute (tendances)<br>Volume courant<br>Fréquence respiratoire (tendances)<br>Rapport I/E (tendances)<br>Aide Inspiratoire (tendances)<br>Événement (tendances)<br>SpO2 (tendances)<br>Observance<br>Informations sur l'appareil<br>Rappel |

Pour revenir à l'écran d'accueil :

Pour re-verrouiller, appuyer de nouveau sur les touches et

### Options

- Identification circuit (écran d'accueil) : reconnaissance du circuit, masque, humidificateur et filtre AB si présent. Suivre les indications à l'écran.
- **Toujours mettre l'option Smart Start en OFF** (arrêt et démarrage automatique du ventilateur au retrait et à la mise en place du masque).
- **ATTENTION** : penser à toujours vider l'humidificateur avant de transporter le ventilateur.