

# TRILOGY 100 (Philips Respironics)



Batterie amovible (autonomie de  $\pm$  4 heures)

Connecteur d'O<sub>2</sub> (optionnel)

- Ventilateur support de vie pour l'enfant et l'adulte (ajouter humidificateur externe si nécessaire)
- Modes ventilatoires : CPAP, S, ST, T, PC, V(A)C, VACI, PACI, AVAPS-AE (MPV avec circuit à valve)  
**(poids minimal 5 Kg pour la détection du débit inspiratoire)**
- Possibilité d'ajouter un volume courant (VT) minimal : AVAPS  
**Attention : VT minimal 50 mL**
- Batterie interne : autonomie  $\pm$  3h ; batterie amovible : autonomie  $\pm$  4h ; ajout batterie externe possible
- Pour rajouter de l'O<sub>2</sub> : relier l'O<sub>2</sub> mural au raccord d'O<sub>2</sub> qui est à brancher à l'arrière de l'appareil
- **Attention : alarmes validées pour un poids > 5Kg**


## Pour allumer et éteindre l'appareil / Mise en route et arrêt de la ventilation :

Pour allumer l'appareil : appuyer sur . **ATTENTION, la mise en tension enclenche la ventilation.**


Pour arrêter la ventilation : appuyer sur et confirmer la mise hors tension avec le bouton droit.

**ATTENTION, l'arrêt de la ventilation met l'appareil hors tension.**

## Principe de navigation

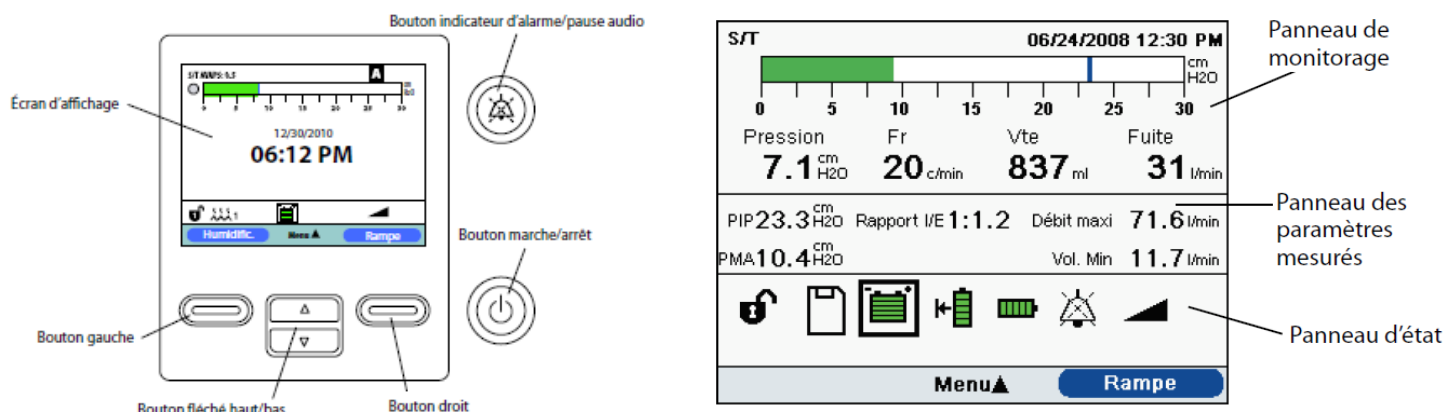


## Accès au « mode clinique » (déverrouillage/verrouillage)

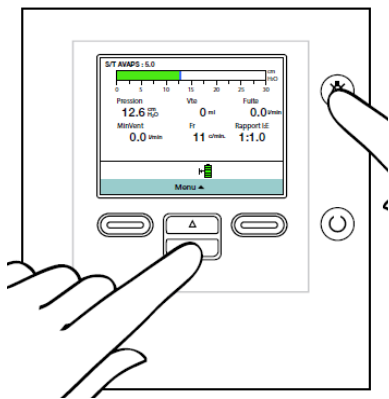

Appuyer **simultanément** sur le bouton alarme et la flèche du bas jusqu'au double bip sonore.

Attention : le ventilateur peut être déverrouillé hors tension.

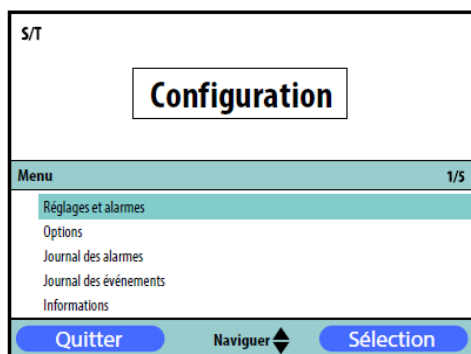

Pour naviguer entre les différentes options ou valeurs, utiliser les boutons HAUT/BAS.

Pour valider une option ou quitter l'écran, utiliser les boutons GAUCHE/DROITE.

## Options (Menu – Réglages et alarmes)

Possibilité de configurer une « double prescription » de ventilation (réglages principaux et réglages secondaires).

